

## 正しい尿の採取の仕方（尿細胞診用）

自分でできる。  
自宅でもできる。  
在宅臨床検査

<http://kensa.biz>

**+kensa.biz**



|     |       |   |   |
|-----|-------|---|---|
| 採取日 | 年     | 月 | 日 |
| 氏名  | _____ |   |   |

氏名・年齢・採取日を記入して容器  
にお貼りください。


- ※ 採取前に必ず同封の検体添付用ラベルに**氏名（カタカナ）**・**注文番号**・**年齢**・**採取日**を記入してください。
- ※ **朝一番の尿を採取してください。**
- ※ **中の液体は捨てないようにご注意ください。細胞を固定するのに必要です。**
- ※ 検体容器到着後は、なるべくお早目に検体を採取してご返送ください。

### 【検体採取の手順】

- ① 同封の折りたたみコップをキチンと開き、まずこのコップの半分位まで尿を入れてください。
  - ② 次に専用試験管をビニール袋から取り出してください。
  - ③ 取り出した専用試験管のキャップをねじって外し、その中にコップから尿をうつしてください。  
尿は試験管のできるだけ上位まで入れてください。（約 10cc 程入ります。）
  - ④ 尿を入れたら専用試験管のキャップをしっかり締め、氏名（カタカナ）・注文番号・年齢・採取日を記入したラベルを試験管に貼ってください。  
最初に試験管が入っていたビニール袋に戻し、しっかりチャックを閉めてください。
  - ⑤ 最後に、同封の返信用封筒に、検体④と返送伝票を入れ、速やかに最寄の郵便ポストへ投函してください。
- ※休業日には検体の受取りができませんので、ご返送の際にはお気をつけください。

### 【検査結果について】

検査結果は kensa.biz ホームページで確認できます。検査キットの購入・結果の閲覧には、会員登録が必要となります。HP上のショッピングガイド、または、ログインページをご参照下さい。会員様ログインより会員認証を行い、ご自分の検査結果をマイページにてご確認下さい。

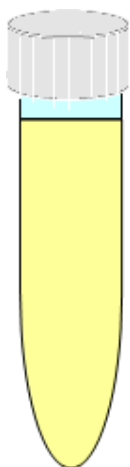

キャップはねじって外してください。  
検体を入れた後は、キャップをしっかりと元に戻してください。

※試験管の上の位置まで尿を入れてください。（約 10ml）

※中の液体は捨てないようにしてください。

Kensa.biz

医療法人社団理仁会 予防医学研究所

土曜午後・日曜・祝日 休業

※夏期・年末年始に臨時的休業日がありますので、<http://36350010.com/schedule> より営業日をご確認の上、ご返送ください。