

クラミジア・淋菌(SDA)用容器(尿用)	
採取量	3ml
有効期間	容器表示
検査項目	クラミジア-DNA《SDA》 淋菌-DNA《SDA》



※HP掲載の写真と異なります。ご了承ください。

※クラミジア・淋菌容器の中に水滴がついていることがあります。拭いたりせずそのまま尿を入れてください。

※ **できれば最後に排尿してから2時間以上経過した後に採尿してください。朝の第一尿ならなお良いです。**

※ **検査容器には使用期限があります。なるべくお早目に検体を採取し、ご返送ください。**

【検体採取の手順】

- ① 袋から折りたたみカップを取り出してキチンと開き、採尿します。
- ② 次に袋からピペット（スポイト）と検体を入れる容器2種類を取り出します。
- ③ カップに採った尿をピペット（スポイト）で吸い上げ、それぞれに入れます。
- ④ このときに、**クラミジア・淋菌用容器の場合は、容器の上部にある矢印におさまる量を入れてください。**（下記 図1参照）この矢印より少なかったり、多かたりすると正確な検査結果が得られませんので、ご注意ください。そして、キャップをしっかり締め、1~2回上下に回転させてください。トリコモナス用の容器はできるだけ上の部分まで尿を入れます。（下記 図2参照）
- ⑤ クラミジア・淋菌用容器のあいている部分に、油性ペンなどでお名前をカタカナで、その後ろに注文番号を記入します。トリコモナス用容器の場合にも、付属のラベルにお名前（カタカナ）・注文番号を記載して、検体に貼ってください。そして、最初に検査キットが入っていたビニール袋に戻し、しっかりチャックを閉めてください。
- ⑥ 最後に、同封の返信用封筒に、検体⑤と返送伝票を入れ、速やかにご返送ください。


※休業日には検体の受取りができませんので、ご返送の際にはお気をつけください。

※夏場などは気温の高いときには、郵便局への持ち込みをお勧めいたします。


【検査結果について】

検査結果はkensa.biz ホームページで確認できます。検査キットの購入・結果の閲覧には、会員登録が必要となります。HP上のショッピングガイド、または、ログインページをご参照下さい。会員様ログインより会員認証を行い、ご自分の検査結果をマイページにてご確認下さい。

【図1 クラミジア・淋菌用検査容器】

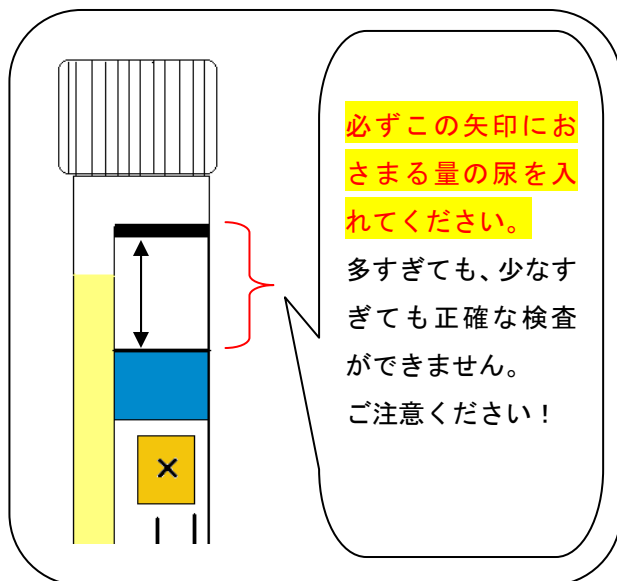

【図2 トリコモナス用検査容器】

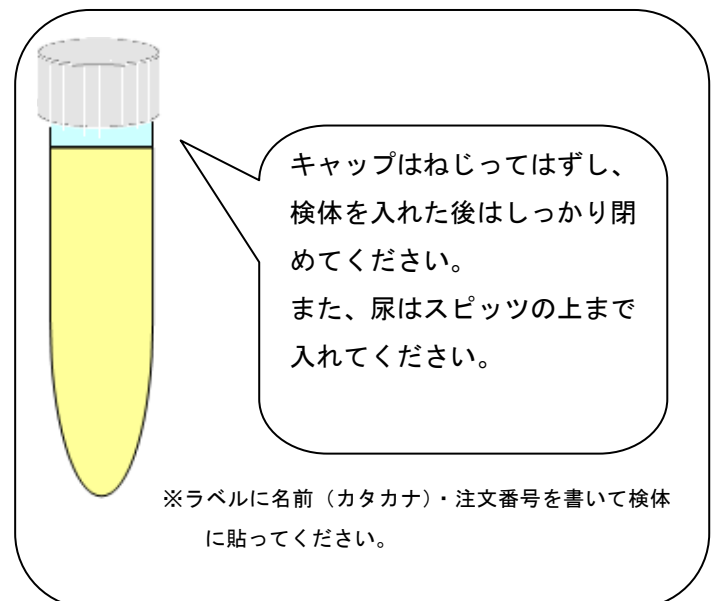

Kensa.biz

医療法人社団理仁会 予防医学研究所

土曜午後・日曜・祝日 休業

※夏期・年末年始に臨時的休業日がありますので、<http://36350010.com/schedule> より営業日をご確認の上、ご返送ください。