


咽頭ぬぐい液の採取方法（喉のクラミジア・淋菌検査用）

咽頭ぬぐい液を検査することによって、①咽頭クラミジア検査 ②咽頭淋菌検査を行うことができます。
この検査では、【検体希釈液付きのスワブ】を用います。

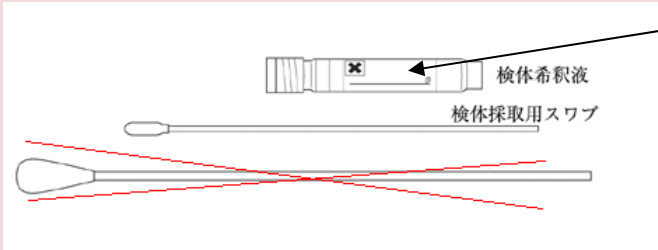

※貼ってあるラベルの空いているところに、お名前（カタカナ）・注文番号をご記入ください。


（一番下の大きい綿棒はこの検査では使用しません。）

※検査キットには使用期限があります。商品到着後はできるだけお早目にご使用ください。

【検体の採取方法】


1. 滅菌パウチの開け口マーク部分を剥がして開けます。
2. 検体採取用スワブをパウチから取り出します。（このときにスワブの先の部分及び棒の部分に何も触れないように注意してください。）
【注意】 ※大きな綿棒は使用しません。
3. 鏡の前で口を大きく開きます。
4. 咽頭扁桃（図1）の辺りにスワブの先端部分をこすり付けます。

図1) 咽頭拭い部分

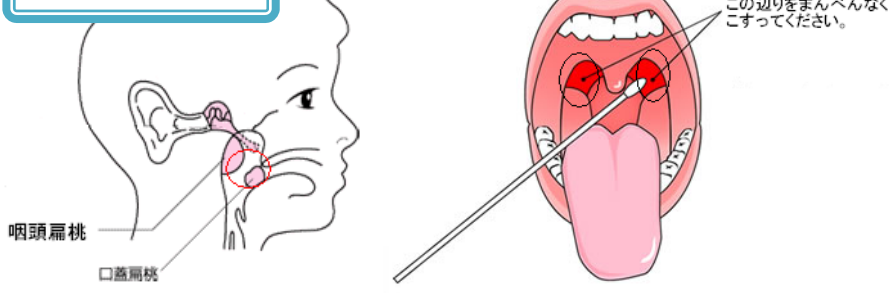


注意！！
スワブの柄の部分は折れやすくなっております。検体採取の際にはご注意ください。


5. 先端部分が咽頭の分泌物で濡れたら終了です。
6. 希釈液の入った容器の蓋を開け、検体採取をしたスワブを検体希釈液に浸します。（図2）
7. 軸の刻み目のついた部分で折ります。（図3）
※希釈液が撥ねないように注意してください。
8. 希釈液の入った容器の蓋をしっかりと閉めます。（図4）
9. ラベル部分にお名前（カタカナ）・注文番号をご記入ください。

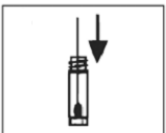

（図2）

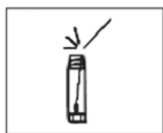

（図3）

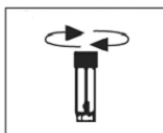

（図4）

スワブは中に入れてまましてください。

【検体のご返送と検査結果について】

検体が採取できましたら、同封の返信用封筒に検体と返送伝票をお入れになって、速やかに最寄の郵便ポストに投函してください。

検査結果はkensa.biz ホームページで確認できます。検査キットの購入・結果の閲覧には、会員登録が必要となります。HP上のショッピングガイド、または、ログインページご参照下さい。会員様ログインより会員登録を行い、ご自分の検査結果をマイページにてご確認ください。

Kensa.biz

医療法人社団理仁会 予防医学研究所
土曜午後・日曜・祝日 休業

※夏期・年末年始に臨時的休業日がありますので、クリニックのHP <http://36350010.com/schedule> より営業日をご確認の上、ご返送ください。

*クリニック休診日には検体の受取りができませんので、ご返送の際にはお気をつけください。