

採血器具の使い方 (予備のピンク色のランセットの使い方)

自分でできる。
自宅でもできる。
在宅臨床検査

<http://kensa.biz>

+kensa.biz

《禁忌・禁止》

- ・再使用禁止
- ・出血性疾患や薬剤服用等により、止血機能が低下している方への使用禁止

《ご注意》


- 1.採血器具は分解したり使用目的以外に使わないでください。
- 2.採血器具はお子様の手が届かない場所に保管してください。
- 3.採血器具は1回用の使い捨てです。繰り返しでの使用や複数人での共用は、感染の危険性があるため、1度使用した採血器具は使わないようにしてください。
- 4.使用後の採血器具はそのままの状態にしておいてください。(リキャップしないこと。)
- 5.採血後は、刺した部分をティッシュペーパー等で軽く押さえ、止血用のバンソウコウを貼ってください。
- 6.刺した部分が化膿した場合は、医師にご相談ください。
- 7.キット到着後はできるだけお早目にご使用ください。

採血器具 (ランセット) の説明 (採血器具は安全に作られています)

ランセットは、穿刺針 (刃) とそれを格納するホルダー、及び保護キャップから構成されています。穿刺後は針が自動的に本体内部に格納され、安全です。



《注意》血液の出にくい方・冷え性の方・指先の角質がお仕事から厚くなっている方は、お風呂上がりなど指先がやわらかくなっているときに採血をしてください。

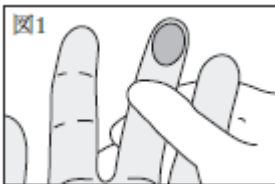


- 1.指先を石鹸と温水で洗ったあと、乾燥させ、指先をよくマッサージしてください。
その後、穿刺部分を消毒します。(図1)



- 2.本体の保護キャップをねじって引っ張り、ホルダーから取り出します。(図2)


さあ、採血しましょう！

《注意》・採血器具は安全にできています。軽く押し当てただけではあまり血が出ませんので、強く押し当てて使いましょう。
・採血後は、念のためにバンソウコウを貼り、清潔にしてください。

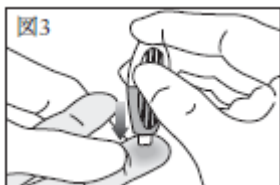

- 1.ホルダーを指で保持し、指のやわらかい部分にホルダーの先端部分を強く押し当てます。(このときにホルダーの先端が若干引っ込みます。)(図3)

※採血はご自身で行ってください。(他の人への採血行為にはしかるべき資格が必要です。)

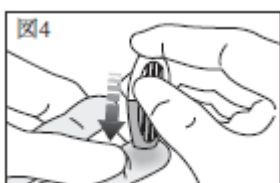

- 2.「カチッ」という作動音がするまでさらに押し付けてください。(図4)
- 3.出血したら、血液は「採血用濾紙」にしみ込ませてください。