

はじめに

リラックスして楽に挿入が
できる姿勢を選びましょう





STEP: 1 膣内にスポイトを挿入します

- ① スポンジがスポイト内に収まっていることを確認してください。
ホルダー部（クリーム色の部分）を持ってください。
- ② スポイトを膣の奥まで十分に（スミレ色の部分をすべて）ゆっくり
挿入してください。



スポイトは子宮の中まで入ることはありません。

スポンジがまれに出ている場合がありますが、ご使用上に問題はありません。

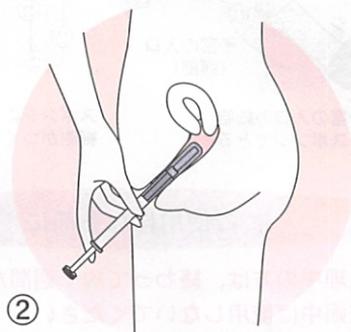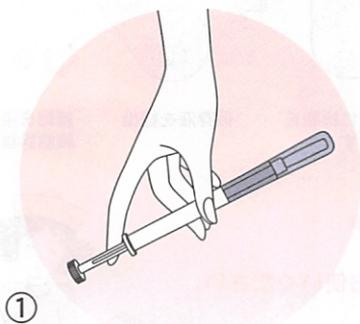

STEP: 2 膣内の細胞を採取します

- ③ ピストンを押してスポンジを出し、ピストンのボタンを指で押えます。
- ④ 膣壁にそってゆっくりと5~6回まわしてください。
スポンジに細胞が吸収されます。

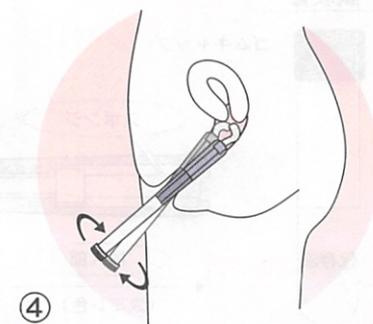
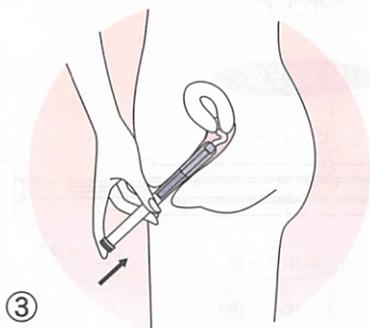




STEP : 3 スポイトを膣から引き出します

- ⑤ スマイレ色の部分が半分出るくらい膣から引き出します。
⑥ ピストンを引きスポンジをスポイト内にしまってから、スポイトを膣から引き出します。

《注意》スマイレ色の部分が全部入ったままでピストンを強く引くとスポンジがはさまって切れるおそれがあります。膣から取り出した時にスポンジの長さを確認してください。

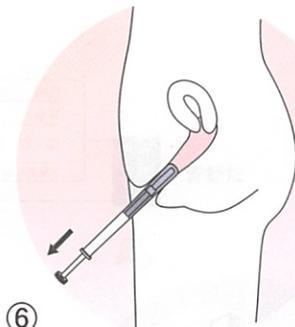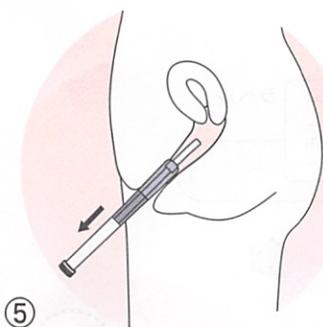


STEP : 4 スポンジの細胞を試験管に洗い出します

保存液の中にスポンジを入れ、ピストンを5～6回上下させてください。細胞が洗い出された保存液が検査物ですので、しっかりキャップをしめ折り返してください。



《注意》

採取後は、すぐに試験管の中に洗い出してください。

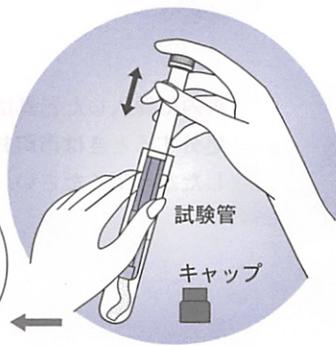


STEP : 5 試験管を提出します

以上でホームスミアセット（細胞採取）は終了です。
以下のチェック項目を確認の上、なるべく早く指示された
場所に提出してください。

チェック項目

- 保存液のキャップはきちんとしめて折り返しましたか？
- ラベルに必要事項を記入し、試験管にはりましたか？
- 健康調査表（問診表）に記入しましたか？
（添付されている場合のみ）

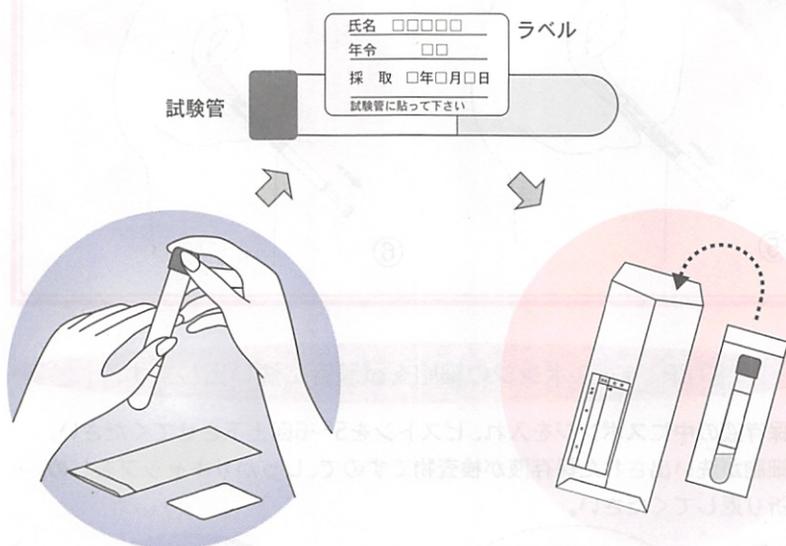

腔内に挿入した器具は、再び使用できません。

処分するときは市町村のゴミ区分（プラスチックごみ）に
したがってください。

*類別及び一般的名称：機械器具（42）医療用剥離子／婦人科用剥離子
一般医療機器（JMDNコード：70955000）

ホームスミアセット

再使用禁止

【禁忌・禁止】


- 本製品は単回使用である。（再使用禁止）
- 滅菌使用期限のきれたものは使用しないこと。

【形状・構造等】

1. 組成

- 試験管…P.P
- キャップ…ゴム
- 保存液…50%濃度のエタノール 3cc
- スポイト…P.P、クレアレン
- スポンジ…天然ゴムスポンジ

2. 形状、各部の名称

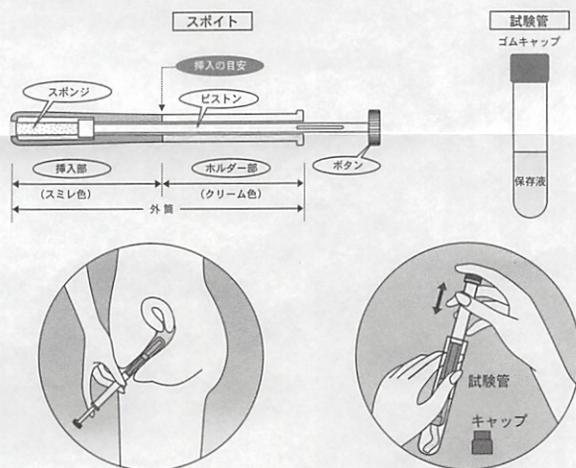

子宮頸部の細胞を擦過採取するスポンジのついた採取器具のスポイトと採取細胞を保存液に洗い出し、検査所へ送る返送容器の試験管とで構成されている。

【性能、使用目的、効果・効能】

*細胞学的診断に供する粘膜細胞組織を子宮頸部から採取するために用いる器具をいう。本品は単回使用である。

【操作方法又は使用方法等】

1. 膈内にスポイトを挿入する。
2. 膈内の細胞を採取する。
3. スポイトを膈から出す。
4. スポンジの細胞を試験管に洗い出す。
5. 試験管を所定の場所に提出する。

【使用上の注意】

1. 滅菌品であるので、開封後は早く使用する。
2. 生理中の方は終って1週間たって使用する。

3. 妊娠中の方は使用を避ける。
4. 使用前日の性交、膈内洗浄は避ける。
5. 提出の当日又は前日に採取する。
6. 以前婦人科の治療、手術を受けたことのある方は、専門医に相談して使用する。
7. スミレ色の部分が全部入ったままでピストンを引くとスポンジがはさまって切れるおそれがあるので、スミレ色の部分を半分くらい出し、ピストンを引いてスポンジをスポイト内にしまってから、スポイトを膈から出す。
8. 問診票があれば記入のうえ、共に提出する。
9. 郵送の場合はできるだけ早く投函する。（約1週間以内に到着のこと。）
10. この検診は1次検診（マスキング）ですので、要精検の判定を受けた方は2次検診（精密検査）を受けることを推奨する。

【作動・動作原理】

スポイトの先端のスポンジで、子宮頸がんの発生しやすい子宮の入口付近の細胞を擦過採取する。採取細胞は保存液に固定されて、所定の検査所で塗抹、染色、鏡検の細胞診判定を行う。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

保管方法：常温、常湿、直射日光をさげ保管
使用有効期限：滅菌後2年

【包装】

本品は1セット単位包装

【主要文献及び文献請求先】

1. 主要文献名：野田 定監修「膈スミア自己採取法による子宮癌検診の追跡調査について」
2. 請求先：アイエスケー株式会社 営業部
〒113-0034
東京都文京区湯島4-9-12
TEL 03-3812-0191

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

アイエスケー株式会社
〒113-0034
東京都文京区湯島4-9-12
TEL 03-3812-0191

取扱説明書を必ずご参照下さい。