

# 正しい 大便の とり方

※必ず、説明書を読んでから採便して下さい

## 注意事項

- アルミシールは、やぶらないで下さい。
- 1本の容器に、2日分とらないで下さい。
- 容器の液を捨てたり飲んだり、水を足したりしないで下さい。
- なるべく新しい便を提出して下さい。
- 生理中は、採便をしないで下さい。
- 人体に直接使用しないで下さい。
- 大便をとる目的以外には使用しないで下さい。
- 保管は、子どもの手の届かない所にして下さい。

## 1 ラベルに氏名等を記入




※必ず、採便した日・時を記入して下さい



- ① キャップを回して、
- ② 引きぬく

## 2 便をとりすぎると、正しい検査ができません

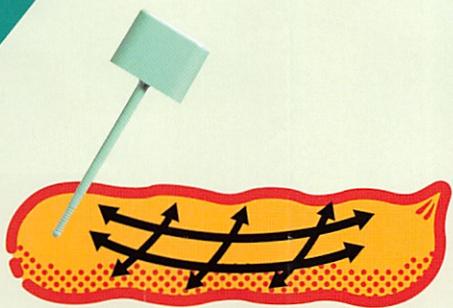

表面をまんべんなくこすり取る

とる量

みぞ

先端のみぞに埋まるくらい


## 3 さし込んで、キャップを強く押す



パチンと音がするまで

※1回さし込んだら、ぬかないこと

1日目 青字ラベル  
2日目 赤字ラベル

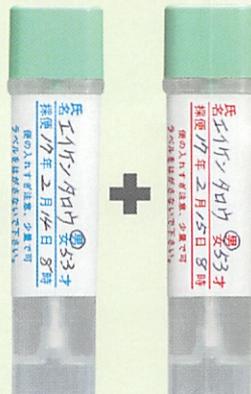

➔ 提出用袋に2本入れ  
➔ すぐに提出

採便後は冷暗所で保存

和式



洋式



正しく検査をして  
いつも健康で  
いようネ