

咽頭ぬぐい液の採取方法（一般細菌検査用）

咽頭ぬぐい液中の一般細菌を、48時間培養した後に同定します。
この検査では、【シードスワブ2号】を用います。



シードスワブ2号

※検体についているラベルに直接お名前(カタカナ)・注文番号・採取日をご記入ください。

こちらの綿棒で検体を採取します。採取後はチューブに入れたままにしてご返送ください。


※検査キットの使用期限にかかわらず、なるべくお早目に検体を採取してください。

【検体の採取方法】

1. シードスワブの袋を開けます。
2. 培地チューブの透明キャップをねじって開けます。次にオレンジのキャップの付いた綿棒を引き出します。この時、綿棒の先の部分及び棒の部分に何も触れないようにします。
3. 鏡の前で口を大きく開きます。
4. 咽頭扁桃（※図参照）の辺りに綿棒の先端部分をこすり付けます。
5. 先端部分が咽頭の分泌物で濡れたら終了です。
6. 先程キャップをはずした培地チューブに綿棒を差し込みます。（綿棒についているオレンジのキャップで培地チューブにフタをする形となります。）
7. オレンジのキャップをきつく閉めて、容器のラベル部分にお名前（カタカナ）・注文番号・採取日をご記入ください。

※注意※

検体を採った綿棒は培地チューブに入れたままご提出ください。綿棒が入っていない状態では検査が実施できませんので、ご注意ください。

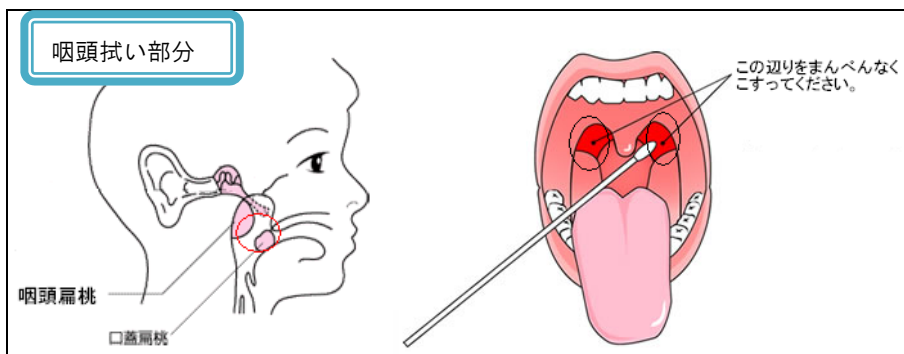

【検体のご返送と検査結果について】

検体が採取できましたら、同封の返送用封筒に検体と問診表をお入れになって、速やかに最寄の郵便ポストに投函してください。

また、検査結果は kensa.biz ホームページで確認できます。検査キットの購入・結果の閲覧には、会員登録が必要となります。HP上のショッピングガイド、または、ログインページをご参照下さい。会員様ログインより会員認証を行い、ご自分の検査結果をマイページにてご確認下さい。

Kensa.biz

医療法人社団理仁会 予防医学研究所

土曜午後・日曜・祝日 休業

※夏期・年末年始に臨時的休業日がありますので、

ツインタワーすみとクリニックHP <http://36350010.com/schedule> より営業日をご確認の上、ご返送ください。

***クリニック休診日には検体の受取りができませんので、ご返送の際にはお気をつけください。**