

胃がん検査における注意事項

この度はKENSA、BIZでの胃がん検査のお申し込み、誠にありがとうございます。

この検査では、便を用いて、ヘリコバクター・ピロリ菌の有無をチェックし、さらに、胃粘膜の萎縮性を反映する血中ペプシンノゲンを測定することによって、胃がんになりやすい状態を見つけ出すことができます。

必要な検査キット



ピロリ菌検査の採便容器の使用期限は短いため、到着後できるだけお早目にご使用ください。

使用期限は個別に表示されています。

- ① 採血用ろ紙セット
- ② 便中ピロリ抗原用採便セット

※万が一、ランセットの針が出ない等ありましたら、予備のピンク色のランセットをお使いください。
(使い方は別紙「採血器具の使い方」をご参照ください。)

【説明書について】

- ① 採血用ろ紙セットの説明書…ろ紙セットに同封されている「採血器具の使い方」をご覧ください。
- ② 便中ピロリ抗原用採便セット…容器が入っている青い袋の中の「便のとりかた」をご覧ください。

【採取終了後】

- ① 採血用ろ紙セット…自然乾燥させ、ろ紙にお名前（カタカナ）・注文番号・年齢・性別・採取日を記入し、ビニール袋に戻してください。
- ② 採便セット…ラベルにお名前（カタカナ）・注文番号・採取日をご記入し、元の通りブラシの柄に巻きつけてください。青い袋にもお名前（カタカナ）・注文番号・年齢・性別・採取日をご記入して、検体を入れてください。

その後、返信用封筒に返送伝票と検体①②をお入れになって、速やかにご返送ください。

※休業日には検体の受取りができませんので、ご返送の際にはお気をつけください。

※夏場など気温の高いときには、郵便局への持ち込みをお勧めいたします。

【検査結果について】

検査結果はkensa.biz ホームページで確認できます。検査キットの購入・結果の閲覧には、会員登録が必要となります。HP上のショッピングガイド、または、ログインページをご参照下さい。会員様ログインより会員認証を行い、ご自分の検査結果をマイページにてご確認ください。

Kensa.biz

医療法人社団理仁会 予防医学研究所

土曜午後・日曜・祝日 休業

※夏期・年末年始に臨時的休業日がありますので、<http://36350010.com/schedule> より営業日をご確認の上、ご返送ください。