

正しい尿の採取の仕方（男性クラミジア・淋菌用）

自分でできる。
自宅で行える。
在宅臨床検査

<http://kensa.biz>

+kensa.biz

クラミジア・淋菌(SDA)用容器(尿用)		
	採取量	3ml
	有効期間	容器表示
	検査項目	クラミジア-DNA《SDA》 淋菌-DNA《SDA》

※HP掲載の写真と異なります。ご了承ください。

※容器の中に水滴がついていることがあります。拭いたりせずそのまま尿を入れてください。

※ **最後に排尿してから2時間以上経過した後に採尿してください。**

※ こちらの容器には使用期限がありますので、なるべくお早目に検体を採取し、ご返送ください。

※ 検体チューブの空いている部分に油性ペン等で直接お名前（カタカナ）・注文番号をご記入ください。


【検体採取の手順】

- ① 袋から折りたたみカップを取り出してキッチンと開き、採尿します。
- ② 次に袋からピペット（スポイト）と検体を入れるチューブを取り出します。
- ③ カップに採った尿をピペット（スポイト）で吸い上げ、検体チューブに入れます。
- ④ このときに**検体チューブの上部にある矢印におさまる量を入れてください。**この矢印より少なかったり、多かたりすると正確な検査結果が得られませんので、ご注意ください。
- ⑤ 検体チューブに尿を入れたらキャップをしっかり締め、1～2回上下に回転させます。
- ⑥ 検体チューブの空いている部分に、お名前をカタカナで、その後ろに注文番号を記入します。
そして、最初に検査キットが入っていたビニール袋に戻し、しっかりチャックを閉めてください。
- ⑦ 最後に同封の返信用封筒に検体⑥と返送伝票を入れ、速やかに最寄の郵便ポストへ投函してください。

※休業日には検体の受取りができませんので、ご返送の際にはお気をつけください。

【検査結果について】

検査結果はkensa.biz ホームページで確認できます。検査キットの購入・結果の閲覧には、会員登録が必要となります。HP上のショッピングガイド、または、ログインページをご参照下さい。会員様ログインより会員認証を行い、ご自分の検査結果をマイページにてご確認ください。

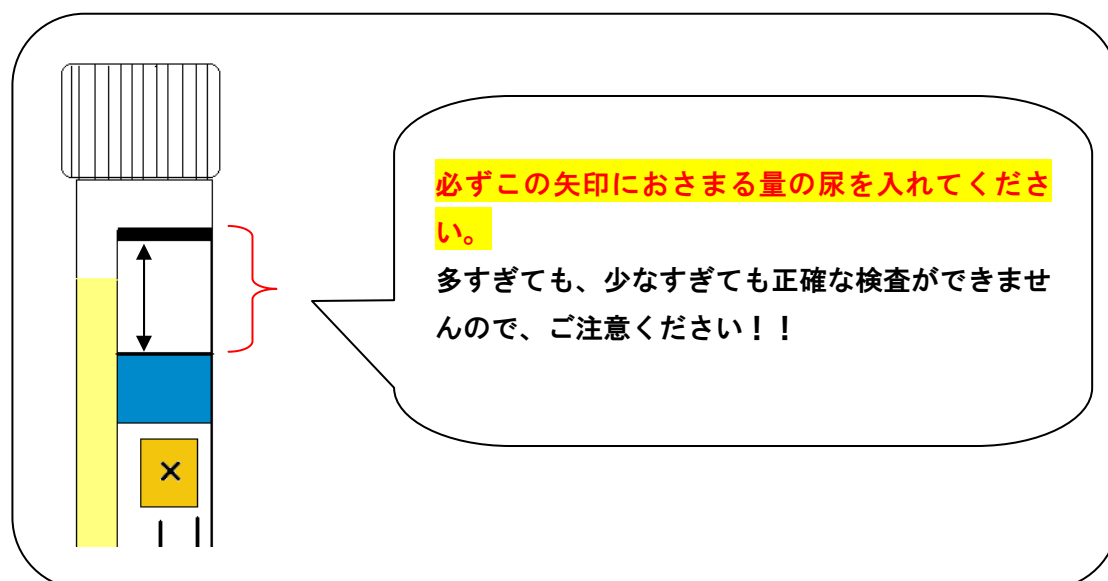

Kensa.biz

医療法人社団理仁会 予防医学研究所

土曜午後・日曜・祝日 休業

※夏期・年末年始に臨時的休業日がありますので、<http://36350010.com/schedule> より営業日をご確認の上、ご返送ください。