

かんたん採血セットをご利用いただくために

◆採血方法・遠心分離機の使い方はそれぞれ箱の中の説明書をご覧ください。



【かんたん採血セット】



【かんたん遠心機】

※それぞれ箱の中の説明書をよくお読みになった上で、実施してください。
また、遠心機は2回目以降の検査にもご利用いただけます。大切に保管してください。

■検体採取後はすみやかにKENSABIZにご返送ください。

- ◎ 使用済み、未使用採血キット類はKENSABIZで処理しますので、**簡単採血セットの箱ごと**ご返送ください。
- ◎ 「返信用封筒」に採血セットと返送伝票を入れ、ポストに投函もしくは郵便局にお持ちになってご返送ください。
- ◎ 検査キット到着後はできるだけお早目に検体を採取してください。
- ◎ クリニックの休診日には検体の受取りができませんので、ご返送の際にはご注意ください。
(土曜午後・日・祝日 休診 ※夏期・年末年始に臨時的休業日がありますので、ツインタワーすみとクリニックのHP→<http://36350010.com/schedule> より診療日をご確認の上、ご返送ください。)

【検査結果について】

検査結果は kensa.biz ホームページで確認できます。検査キットの購入・結果の閲覧には、会員登録が必要となります。HP上のショッピングガイド、または、ログインページをご参照下さい。会員様ログインより会員登録を行い、ご自分の検査結果をマイページにてご確認ください。

△▼ 使用上の注意事項 △▼

※次の方は使用しないでください。

- 血の止まりにくい方
- ショックアレルギーのある方
- 小児（ご自身以外で採血する行為は医療行為にあたるため、相応の資格が必要となります。）

※取り扱い上の注意

- 採血セット及び遠心機は分解しないでください。
- 採血セット及び遠心機は本目的以外に使用しないでください。
- 穿刺器具は、使用する前に赤い部分を押ししまうと使用できなくなります。
- 穿刺器具（2個）は、使用・未使用にかかわらず、検体チューブとともにご返送ください。
- 輸送中に血液が漏れないよう、白色キャップ（輸送用）はしっかり閉めてください。

※保管上の注意

- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 遠心機は2回目以降のお申し込みには、付属しませんので大切に保管してください。

※採血時の注意

- 採血は食後4時間以上経過後に実施してください。（生活習慣病検査のみ）
- 採血量不足により、検査が全項目実施できない場合もあります。
- 採血は清潔で水平なテーブルの上で行ってください。

再度採血をお願いする場合がありますので、ご了承ください。

「採血が上手くいかない」などお困りの点がありましたらお気軽にご連絡ください。

E-mail : info@kensa.biz

TEL : 03-3635-0010

*お電話は併設のクリニック直通となりますので、最初に「ケンサビズについて」とおっしゃってください。
またご連絡の際にはご注文No.をお知らせください。

なお、お電話によるお問い合わせは、日曜祝日を除くクリニック診療時間内をお願いいたします。

平日 09:00~12:30 15:00~18:30

土曜 10:00~13:00

また、休診時間帯にいただいたメールへのご返信には少しお時間をいただく場合があります。ご了承ください。

到着後は
できるだけお早めに
採血を実施してください。