


## 性器皮膚の一般細菌培養検査について（女性用）

膣炎・膣症に合併して、膣周囲の粘膜皮膚移行部が、男子の亀頭包皮炎に類似した状態になってしまうことがあります。そういった場合に役立つ検査です。

女性器皮膚の一般細菌検査（培養） ⇒ **シードスワブ2号** を用います。

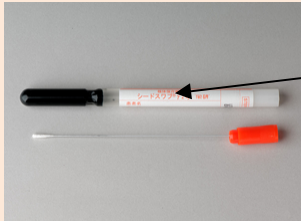

シードスワブ2号

※検体についているラベルに直接お名前（カタカナ）・注文番号・採取日をご記入ください。

※検査キットの使用期限にかかわらず、なるべくお早目に検体を採取してください。

### 【検体採取の手順】

1. シードスワブの袋を開けます。
2. 培地チューブのキャップをねじって開けます。（培地チューブからはずしたキャップは今後不要となります。）次に綿棒を利き手で引き出します。
3. この時、綿棒の先の部分及び棒の部分に何も触れないようにします。
4. 棒の先の綿の部分で皮膚を擦ります。

**大事なのは上皮細胞や分泌物をきちんと採取することです。**

**「これは何だかおかしい。」という部分があれば、その部分から積極的に擦り採るようにしてください。**

5. 十分に検体を擦り終えたら、先ほどキャップをはずした培地チューブに綿棒を差し込みます。
6. 綿棒上部のキャップをきつく締めて、チューブについているラベルにお名前（カタカナ）・注文番号・検体採取日をご記入してください。

以上で検体の採取は終了です。

同封の返信用封筒に検体と返送伝票を入れて、速やかに郵送してください。

※休業日には検体の受け取りができませんので、ご返送の際にはお気をつけください。

※夏場など気温の高いときには、郵便局への持ち込みをお勧めいたします。

### 【検査結果について】

検査結果は kensa.biz ホームページで確認できます。検査キットの購入・結果の閲覧には、会員登録が必要となります。HP上のショッピングガイド、または、ログインページをご参照下さい。会員様ログインより会員認証を行い、ご自分の検査結果をマイページにてご確認ください。

## Kensa.biz

医療法人社団理仁会 予防医学研究所

土曜午後・日曜・祝日 休業

※夏期・年末年始に臨時の休業日がありますので、<http://36350010.com/schedule> より営業日をご確認の上、ご返送ください。また、容器に使用期限がありますのでなるべくお早めにご使用ください。