


正しい尿の採取の仕方（薬物・有機溶剤）

自分ができる。
自宅ができる。
在宅臨床検査

<http://kensa.biz>

+kensa.biz

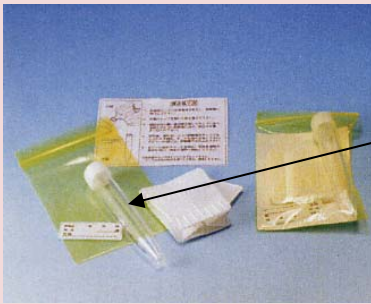

採取日	年	月	日
氏名	_____		
年齢	_____		

氏名（カタカナ）・注文番号・年齢・
採取日を記入して容器にお貼りく
ださい。

※必ず3本分採尿してご返送ください。

検体到着後、専用容器に移すため、HP掲載の容器と異なります。ご了承ください。

※ 採取前に必ず同封の検体添付用ラベルに氏名（カタカナ）・注文番号・年齢・採取日を記入してください。

※ **朝一番の尿を採取してください。**


※ こちらの容器には特に使用期限はありませんが、なるべくお早目に検体を採取してください。

【検体採取の手順】

- ① 同封の折りたたみコップをキチンと開き、採尿します。
 - ② 次に専用試験管をビニール袋から取り出してください。
 - ③ 取り出した専用試験管のキャップをねじって外し、その中にコップから尿を移してください。
尿は試験管のできるだけ上位まで入れてください。尿量が少ない場合、検査ができません。
 - ④ 尿を入れたら専用試験管のキャップをしっかり締め、氏名（カタカナ）・注文番号・年齢・採取日を記入したラベルを試験管に貼ってください。
最初に試験管が入っていたビニール袋に戻し、しっかりチャックを閉めてください。
 - ⑤ 最後に同封の返信用封筒に検体④と返送伝票を入れ、速やかに最寄の郵便ポストへ投函してください。
- ※休業日には検体の受取りができませんので、ご返送の際にはお気をつけください。

【検査結果について】

検査結果は kensa.biz ホームページで確認できます。検査キットの購入・結果の閲覧には、会員登録が必要となります。HP上のショッピングガイド、または、ログインページをご参照下さい。会員様ログインより会員登録を行い、ご自分の検査結果をマイページにてご確認下さい。

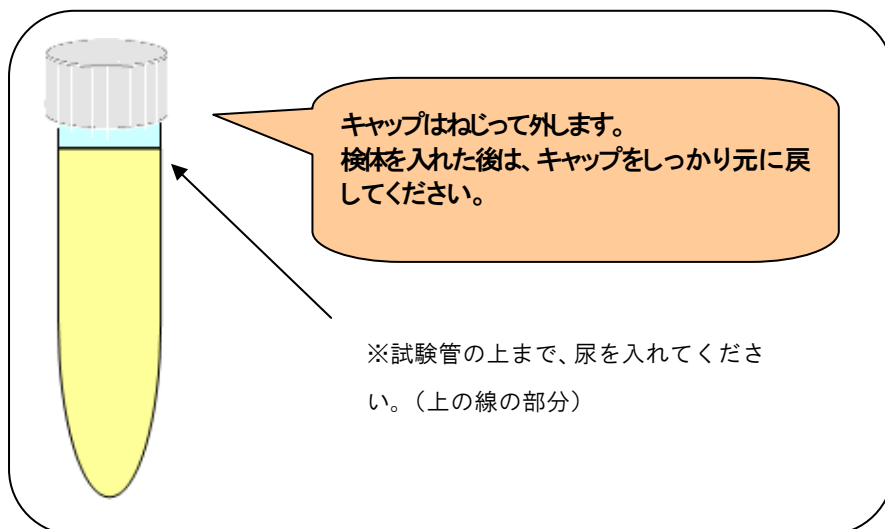

Kensa.biz

医療法人社団理仁会 予防医学研究所

土曜午後・日曜・祝日 休業

※夏期・年末年始に臨時の休業日がありますので、<http://36350010.com/schedule> より営業日をご確認の上、ご返送ください。