

## 寄生虫の虫卵検査における注意事項

この検査は肛門周辺に蟯虫など寄生虫の虫卵が存在するかどうかを検査します。

### 必要な検査キット



■ 寄生虫便テープ(ぎょう虫検査セロファン)…1セット (2日分)

#### 【検体採取の仕方】

2日間にわたって、朝起きたらすぐに行う検査となります。

詳しい使い方は白い袋の裏面に記載されていますので、よくお読みになった上で、お使いください。

#### 【検体採取後】

2日間検体を採り終えたら、白い袋の表に**お名前（カタカナ）・注文番号・採取日（2日間）**をお書きください。

そして、最初に入っていた透明の袋に戻し、返送用封筒に入れ、返送伝票と共に速やかにご返送ください。

※休業日には検体の受取りができませんので、ご返送の際にはお気をつけください。

※夏場など気温の高いときには、郵便局への持ち込みをお勧めいたします。

#### 【検査結果について】

検査結果は kensa.biz ホームページで確認できます。検査キットの購入・結果の閲覧には、会員登録が必要となります。HP上のショッピングガイド、または、ログインページをご参照下さい。会員様ログインより会員認証を行い、ご自分の検査結果をマイページにてご確認ください。

### Kensa.biz

医療法人社団理仁会 予防医学研究所

土曜午後・日曜・祝日 休業

※夏期・年末年始に臨時的休業日がありますので、<http://36350010.com/schedule> より営業日をご確認の上、ご返送ください。